


ContactEZ *Dental Strips* sono riutilizzabili per 4-5 volte, e devono essere sterilizzati prima del primo utilizzo ed ogni impiego successivo. Si prega di seguire queste istruzioni per la pulizia delle vostre *ContactEZ Dental Strips*, sia a mano che in lavatrice, e poi sterilizzarli in autoclave a vapore.


Pulizia

Opzione A. Pulire le strisce ContactEZ a mano.

Step 1. Tenere le strisce ContactEZ sotto il rubinetto, passare ogni striscia sotto un getto regolare d'acqua e strofinare la superficie in acciaio inossidabile con uno spazzolino.

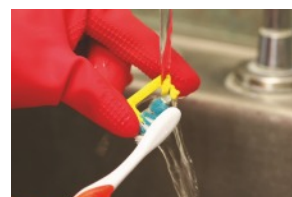

Step 2. Pulire le strisce utilizzando una soluzione detergente in una vasca ad ultrasuoni per 10 - 20 minuti. Risciacquare le *ContactEZ Dental Strips* sotto il rubinetto con un getto d'acqua regolare.

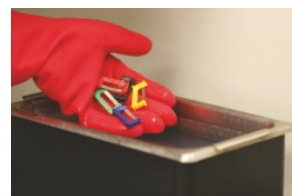

Opzione B. In alternativa, potete pulire le vostre *ContactEZ Dental Strips* con una lavatrice automatica.

Sterilizzazione


Step 1. Dopo la pulizia, sterilizzare le *ContactEZ Dental Strips* in autoclave a vapore (non a secco) massimo 30 psi per 10 minuti, con una temperatura massima di 132°C. ContactEZ consiglia di utilizzare acqua distillata.



Step 2. Una volta completata la sterilizzazione lasciare raffreddare le strisce ContactEZ per 5 minuti.



Step 3. Rimuovere le strisce ContactEZ dall'autoclave con dei guanti. Ora le strisce sono pronte per essere utilizzate.

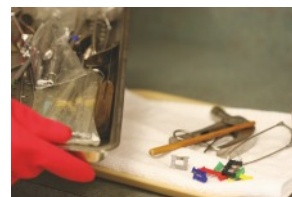

Smaltimento

Quando la superficie abrasiva si è consumata le strisce ContactEZ devono essere smaltite come un normale prodotto di scarto.